



EyeGiene® Insta-Warmth™ System: Für die tägliche Behandlung trockener Augen

- Einfach mitzunehmen: auch unterwegs nutzbar
- Einfache Handhabung: keine Wärmequelle oder Wasser nötig
- Mehr als zehn Minuten wohltuende Wärme

Bitte sprechen Sie vor der Nutzung mit Ihrem Augenarzt

Indikation: EyeGiene® Insta-Warmth™ System bietet Wärme zur Therapie trockener Augen und Chalazione (Hagelkörner).



Wichtige Anwendungs- und Sicherheitshinweise:

Bitte lesen Sie die Anwendungs- und Sicherheitshinweise, bevor Sie das Produkt nutzen. Um das Risiko von Verbrennungen und Personenschäden zu minimieren, sollten Sie das Produkt nur nach Beachtung der Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen anwenden.

- Vermeiden Sie zusätzlichen Druck auf die Augenmaske während des Gebrauchs.
- Schließen Sie die Augenlider, bevor Sie die Maske auflegen.
- Nutzen Sie nur ein (1) Wärmepad pro Auge pro Sitzung.
- Verwenden Sie die Maske nicht bei Verletzungen oder Taubheitsgefühlen.
- Verwenden Sie die Maske nicht nach einer Augenoperation, ohne dies mit Ihrem behandelnden Augenarzt abgesprochen zu haben.
- Wenn sich die Maske zu heiß oder unangenehm anfühlt, setzen Sie sie sofort ab.
- Legen Sie die Maske und/oder die Wärmepads nicht (!) in die Mikrowelle oder erhitzen Sie sie anderweitig. Die Wärmepads sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt und müssen nach Gebrauch entsorgt werden.
- Verwenden Sie die Maske nicht, wenn die Augenlider nicht vollständig schließen.
- Teilen Sie die Maske aus hygienischen Gründen nicht mit anderen.
- Wenn Sie Fragen haben oder unsicher in der Verwendung sind, fragen Sie bitte Ihren behandelnden Augenarzt.

Achtung:

- Kontaktlinsen/ Augenoperationen: Entfernen Sie die Kontaktlinsen oder andere Hilfsmittel vor der Verwendung. Wenn Sie sich kürzlich einer Kata-

rakt- oder anderen Operation am Auge unterzogen haben, sprechen Sie bitte vor Gebrauch mit Ihrem behandelnden Augenarzt.

- Wenn Beschwerden auftreten wie Brennen, Schwellungen, Hautausschlag oder andere Veränderungen der Haut, wo die Augenmaske getragen wurde, entfernen Sie das EyeGiene® Insta-Warmth™ System umgehend und kontaktieren Sie Ihren behandelnden Augenarzt.

Anwendung:

1. Bevor Sie die Wärmepads aus der Folie nehmen, stellen Sie den Gurt der Maske so ein, dass sie genau auf Sie passt und bequem auf Ihren Augen liegt.
2. Nehmen Sie die beiden Wärmepads aus der versiegelten Folie und legen Sie jeweils links und rechts in die Maske.
3. Setzen oder legen Sie sich in eine bequeme Position und entspannen Sie sich. Schließen Sie die Augen und legen Sie die über beide Augen. Um eine maximale Wirksamkeit zu erreichen, empfehlen wir eine Tragedauer von mind. zehn Minuten.
4. Wenn Sie fertig sind, entsorgen Sie die Wärmepads. Die Augenmaske kann mehrfach verwendet werden und ist per Hand oder im Handwaschgang waschbar.



Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.



Manufactured for:
Eyedetec™ Medical, Inc., 9000 Crow Canyon Road, Ste # S348, Danville, CA, USA 94506
CE
Warming Wafer: DO NOT REUSE

Authorized Representative in Europe



Emergo Europe
Molenstraat 15
2513 BH The Hague
The Netherlands
Tel: (31) (0) 70 345-8570
Fax: (31) (0) 70 346-7299